


# OPTIBRUSH® CONT

## KANÜLENREINIGUNGSDOSE

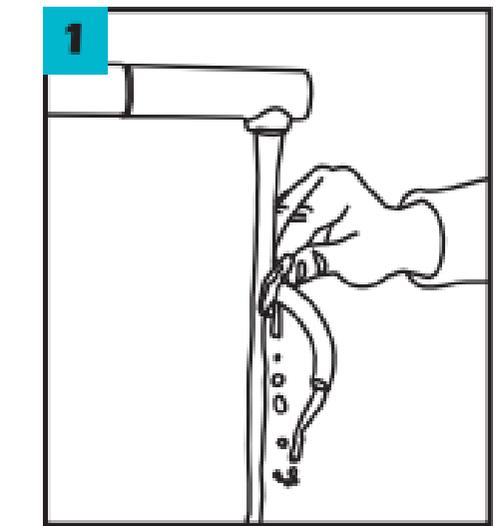


Trachealkanülen müssen entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Patienten regelmäßig gereinigt/ausgewechselt werden.

Verwenden Sie Reinigungsmittel nur, wenn die Kanüle außerhalb des Tracheostomas ist. Bereiten Sie eine Reinigungslösung entsprechend Produktangaben vor.

1. Zunächst die Kanüle unter fließendem Wasser gründlich spülen (siehe Bild 1).


2. Legen Sie immer nur eine Kanüle in den Siebeinsatz der Kanülenreinigungsdose. Werden mehrere Kanülen auf einmal gereinigt, be-

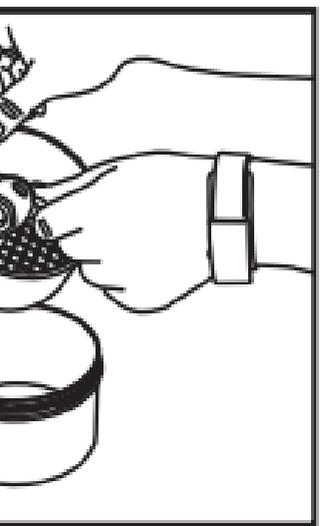

steht die Gefahr, dass die Kanülen zu stark gedrückt und dadurch beschädigt werden. Fassen Sie dabei den Siebeinsatz am oberen Rand an, um einen Kontakt und eine Verunreinigung der Reinigungslösung zu vermeiden (siehe Bild 2). Tauchen Sie nun den Siebeinsatz in den Behälter mit der Reinigungslösung ein.

3. Nach Ablauf der Einwirkzeit (siehe Gebrauchshinweise Kanülenreinigungspulver) wird die Kanüle mehrmals gründlich mit handwarmem, klarem Wasser abgespült. Es dürfen sich keinerlei Rückstände des Reinigungsmittels an der Kanüle befinden, wenn diese in das Tracheostoma eingesetzt wird.

4. Im Bedarfsfall, wenn z. B. hartnäckige und zähe Sekretreste nicht durch das Reinigungsbad entfernt werden konnten, ist eine zusätzliche Reinigung mit einer speziellen Kanülenreinigungsbürste möglich.

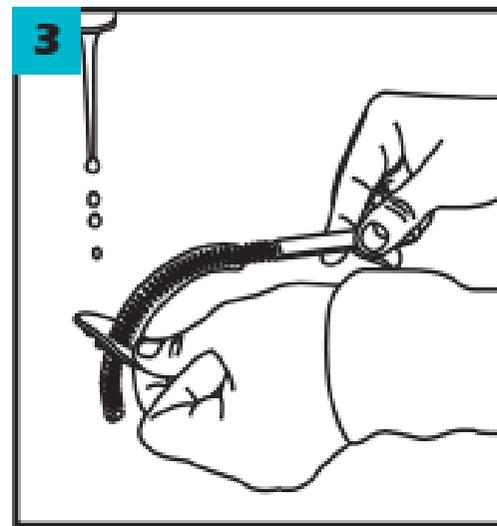

Führen Sie die Kanülenreinigungsbürste immer von der Kanülenspitze aus in die Kanüle ein (siehe Bild 3). Benutzen Sie diese Bürste nach Anleitung und gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, um das weiche Kanülenmaterial nicht zu beschädigen.

Reinigen Sie die Trachealkanülen keinesfalls mit nicht vom Kanülenhersteller zugelassenen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keinesfalls aggressive Haushaltsreiniger, hochprozentigen Alkohol oder Mittel zur Reinigung von Zahnersatz. Es besteht akute Gesundheitsgefahr! Außerdem könnte die Kanüle zerstört bzw. beschädigt werden.

Verwenden Sie für jede Kanülenreinigung stets nur frisch angesetzte Reinigungslösungen. Gebrauchte/benutzte Reinigungslösungen entsorgen und Behälter mit Wasser spülen.



Hersteller: /  
Manufacturer:

**Andreas Fahl**  
**Medizintechnik-Vertrieb GmbH**

August-Horch-Straße 4a  
D-51149 Köln – Germany

Phone +49(0)22 03/29 80-0

Fax +49(0)22 03/29 80-100

mail [vertrieb@fahl.de](mailto:vertrieb@fahl.de)

[www.fahl.de](http://www.fahl.de)

 CE-Kennzeichnung /  
CE marking

**Art.-Nr./REF 31200**

